



RS

RAPIDSTOP®
TOURNIQUET

Specifikacija

Spaustuvo mechaninis suspaudimas 8:1. Greitesnis ir lengvesnis tinkamas suspaudimas ypač svarbus viršutinėje kojos dalyje (šlaunyje)

Spaustuvas

Paprastai ir greitai pritaikomas pasitaikius užstrigusiai galūnei. Nereikalauja specialių įgūdžių. RapidStop® Turniketas gali būti atsegamas ir vėl pritvirtinamas aplie galūnę, be jokių papildomų pastangų, naudojant 'QUICK-CLASP' sistemą galimas lengvas atspaudimas ir suspaudimas net mūvint pirštines.

Greitas užsegimas

Intuityvaus naudojimo integruota sistema. Etiketės instrukcija (1 žingsnis)

ETIKETĖ




LAIKO JRAŠYMO ETIKETĖ YRA UŽ ŽIEDO DIRŽELIO. ŽEMIAU GREITOSIOS SAGTIES.

D-ŽIEDAS

Didelis tvirtas D-žiedas 5.1cm pločio x 3.8cm aukščio (2" plotis x 1.5" aukštis) leidžia lengvai ir greitai suspausti.

- Momentinis suspaudimas viena ranka reikšmingai sumažina kraujagyslės suspaudimo laiką. Lengvai ir greitai naudojamas; nereikalauja stabilizuoti kita ranka ir suteikia **mechaninį stabilumą. 2:1** pranašesnis palyginus su priveržimo mechanizmu. [PASTABA: Blogai atliktas pradinis suspaudimas yra tipinė blogo turniketo uždėjimo klaida.]

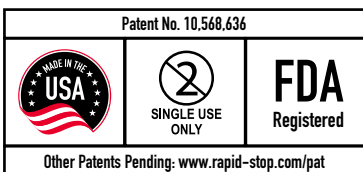

SVIRTIS

Intuityvaus naudojimo integruota sistema
Instrukcija ant svirties (2 žingsnis)

Minimalus 600 N tempimo stiprumas: Normaliomis sąlygomis 200 N yra didžiausia tempimo jėga, reikalinga turniketui, kad saugiai visiškai blokuoti kraujotaką šlaunies srityje. RapidStop® turniketas yra sukurtas naudojant 3 kartus didesnį saugos koeficientą.

DIRŽAS

RapidStop® turniketas yra skirtas įvairių dydžių galūnėms, jų apimtis gali būti nuo 17.8 cm iki 83.8 cm (7" to 33") ir prilgsta daugumos žmonių vidutiniams dydžių parametrams, tokiems kaip moters žasto apimčiai ir vyro viršutinės šlaunies dalies apimčiai.

Mil-W-17337 spec; 3.8cm / 1.5" pločio su 8,000N plyšio stiprumu ir didesniu atsparumu dylimui.



Tipas	Karinis	Pirmoji pagalba	Mokymai
Dalis#	RST100	RST101	RST102
Spalva	Juodas	Oranžinis	Mėlynas
UPC#	9341394017504	9341394017511	9341394017528
Temperatūros diapazonas	-50c to + 50c (-58f to +122f)		
Tempimo stipruma	Minimalus 600N		
Pakuotės dydis	119.56cm Ilgis x 5.1cm plotis x 3.8cm aukštis(7.7" ilgis x 2" plotis x 1.5" aukštis)		
Svoris	127.6g (4.5oz)		
Dirželis	Mil-W-17337 ; 3.8cm plotis : 8,000N		
Galūnių apimtis	17.8cm to 83.8cm (7" to 33")		
Atsparumas	Atsparus ugniai, stipriam spaudimui, stipriam lenkimui		

Paprastas, intuityvus naudojimas, produkte integruotos naudojimo instrukcijos.

1



Tvirtai patraukite
D-žiedą, kol jis
priglus

2



Kelkite svirtį kol
kraujavimas
sustos

3



Sekite laiką iki krauj-
avimo pabaigos.
Papildoami suveržkite
dar kartą.

TINKA:



KARINIAMS
/ TAKTINIAMS
VEIKSMAMS



PIRMAJAI
PAGALBAI



DIDELĖS RIZIKOS
PRAMONEI



EKSTREMALIAM
SPORTUI



PATENTS PENDING

A suite of inventions position
RapidStop® Tourniquet as a market
leader in speed and efficacy.



AWARD WINNING

The most promising non-weapon
tech at the 2014 MIT Soldier
Design Competition.



SELF-APPLICABLE

No need for assistance in applying the
RapidStop® Tourniquet. The innovative
technology allows for fast self-application.

KONTAKTAI

Global: www.rapid-stop.com

 AERO HEALTHCARE, LTD

One The Business Park
Maydwell Avenue, Slinfold
Horsham RH13 OAS
44 845 604 8280

www.uk.rapid-stop.com • sales@aerohealthcare.co.uk

EC REP

Aeromedic GmbH
Ottostraße 11, 41540
Dormagen Germany

AERO Healthcare AUS

63 Seaton Street, Armidale, NSW, 2350
61 2 6776 7200 • 1800 628 881

www.aus.rapid-stop.com • sales@aerohealthcare.com



RAPIDSTOP®
TOURNIQUET

DESIGNED TO WORK, FAST.